


DES 500

Alkoholische Schnelldesinfektion

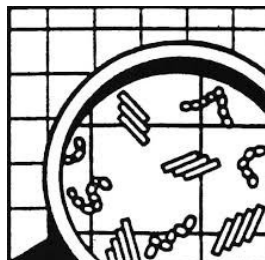

Art.-Nr.: 101056

Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion

- bakterizid inkl. MRSA, levurozid
- tuberkulozid
- schnell trocknend • parfümfrei
- voll viruzid inkl. Polio-, Adeno-, Rota- und Noro-Viren



Eigenschaften:

Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion. Zur Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigem medizinischen Inventar sowie Flächen aller Art.

Anwendung / Dosierung:

Für die Flächendesinfektion eine ausreichende Menge auf ein geeignetes Einmaltuch geben und die Oberflächen damit abwischen. Die Oberflächen müssen während der erforderlichen Einwirkzeit vollständig mit dem Desinfektionsmittel besetzt sein. Starke Verunreinigungen sind zunächst mit einem Desinfektionsmittelgetränktem Einmaltuch zu entfernen. Anschließend kann die Desinfektion mit DES 500 erfolgen. Nach Ablauf der Einwirkzeit können die Oberflächen mit einem sauberen Einmaltuch trocken nachgewischt werden.

Hinweis: Für alle alkoholbeständigen Oberflächen geeignet.

Nicht geeignet für Acrylglas (PMMA)

Wirkspektrum und Einwirkzeiten:

Flächendesinfektion (Wischdesinfektion) gem. VAH /EN 13697 (bakterizid, levurozid, hohe Belastung) – 1 min.

Tuberkulozid gem. EN14348 – 30 Sek.

Viruzid gem. EN 14476 inkl. HBV/HIV/HCV, Polio-,Norovirus,(MNV) Adeno-Virus – 1 Min.

Rota-Virus – 30 Sek.

Technische Daten:

Farbe:	farblos
Konsistenz:	Flüssig
Geruch:	Nach Alkohol
pH-Wert:	4
Dichte:	0,87 g/cm ³

Inhaltsstoffangabe:

Zusammensetzung: 100 g enthalten als Biozid wirksamen Bestandteil 60 g Ethanol.



Entwicklung mit Vernunft für Mensch und Umwelt !

TECHSANO CHEMIE Vertriebs GmbH, Marie-Curie-Str.21, 49134 Wallenhorst
Tel: 05407/30069 Fax: 05407/32062 www.techsano.de info@techsano.de